

## หุ่นจำลองดูแลแผลกดทับ (KOKEN)

(LM-078)



คู่มือการใช้งาน

หุ่นจำลองการดูแลแผลกดทับ

### DECUBITUS TREATMENT MODEL (LM-078)

ชุดจำลองแผลกดทับ บริเวณตำแหน่ง sacral region ประกอบด้วยผิวหนัง 6 ชิ้น แต่ละชิ้นจำลองลักษณะแผลกดทับในระดับที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับ 1-6 โดยผิวหนังแต่ละชิ้นเมื่อประกอบด้วยเข้ากับส่วนฐานแล้วสามารถติดตั้งเข้ากับหุ่นหรือแม้แต่บนตัวผู้ฝึกเองได้อย่างง่ายดาย

#### คุณสมบัติ

- ☐ เพื่อให้เข้าใจถึงรูปร่างลักษณะของแผลกดทับ ในแต่ละระดับ
- ☐ ผิวหนังทำจาก silicone rubber มีลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายผิวหนังของมนุษย์จริงๆ
- ☐ ในการแสดงลักษณะแผลกดทับในระดับต่อไป สามารถทำได้โดยการดึงผิวหนังบนออก
- ☐ สามารถใช้ซัฟไฟเป็นส่วนใหญ่ประกอบในการฝึกได้

หมายเหตุ ไม่ควรทาซัฟไฟบริเวณที่ทาสี เพราะสีอาจจะหลุดออกได้

#### ส่วนประกอบ

- |                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 1. ส่วนฐานพร้อมสายรัด                                     | จำนวน 1 เซ็ต |
| 2. ผิวหนังแสดงลักษณะแผลกดทับระดับ 1 (Flare)               | จำนวน 1 ชิ้น |
| 3. ผิวหนังแสดงลักษณะแผลกดทับระดับ 2 (Blister)             | จำนวน 1 ชิ้น |
| 4. ผิวหนังแสดงลักษณะแผลกดทับระดับ 2 (Defect of epidermis) | จำนวน 1 ชิ้น |

5. ผิวหนังแสดงลักษณะแผลกดทับระดับ 3 (จำลองแผลกดทับ white necrosis organization)จำนวน 1 ชิ้น
6. ผิวหนังแสดงลักษณะแผลกดทับระดับ 3 (จำลองแผลกดทับ black necrosis organization)จำนวน 1 ชิ้น
7. ผิวหนังแสดงลักษณะแผลกดทับระดับ 4 (Defect down to the bone) จำนวน 1 ชิ้น
8. Baby powder จำนวน 1 ชิ้น

### **การใช้งาน**

1. ประกอบชิ้นส่วนผิวหนังเข้ากับฐาน
2. ยึดติดเข้ากันด้วยแถบ Velcro
3. ล็อคเข็มขัดเพื่อยึดชิ้นเนื้อเข้ากับตัวและปรับสายให้กระชับ

### **การใช้งานหุ่นบนที่ราบ**

วางผิวหนังทั้ง 6 ชิ้นซ้อนบนส่วนฐานโดยวางระดับ 4 เป็นชั้นแรกและซ้อนชั้นมาเรื่อยๆไปถึงระดับที่ 1 เมื่อพลิกผิวหนังชั้นบนออกก็จะเห็นผิวหนังชั้นล่างแสดงอาการแผลกดทับในระดับต่อไป

### **การทำความสะอาด**

#### **ส่วนฐาน**

ใช้ก๊อชชุบน้ำในการเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้สารประเภท Thinner หรือ benzene เด็ดขาด เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายได้

#### **ส่วนผิวหนัง**

- ☐ ทำความสะอาดผิวหนังด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ
- ☐ ในการทำความสะอาดชั้นเนื้อแสดงอาการระดับ 2(Blister) ควรระวังอย่าให้ส่วนของผิวหนังลอกหลุดออก (ในกรณีที่ผู้ใช้มีเล็บยาว อาจทำให้ผิวหนังเกิดความเสียหายได้)
- ☐ หลังทำความสะอาดแล้ว ปล่อยให้แห้งและทาแป้งที่ส่วนผิวหนังทั้ง 6 ชั้นก่อนที่จะนำมาซ้อนกับบนส่วนฐานดั้งเดิม

#### **ข้อควรระวัง**

- ☐ หุ่นทำจากวัสดุที่คล้ายกับผิวหนังของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ควรกระทำกับหุ่นอย่างระมัดระวังและนุ่มนวลดังเช่นกระทำกับคนใช้จริงๆ
- ☐ อย่าวางสิ่งของใดๆ ทับตัวหุ่นเด็ดขาด

- ☐ ทำความสะอาดหุ่นทุกครั้งหลังการใช้งาน
- ☐ ห้ามใช้หมึกหรือสีกับหุ่นเนื่องจากรอยเปื้อนอาจไม่สามารถเช็ดออกได้
- เก็บหุ่นในที่ๆไม่โดนแสงแดดโดยตรง