

หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์ (แบบครึ่งตัว) (KOKEN)



1. ชื่อและหน้าที่ของชิ้นส่วนหุ่น

1. แผงหน้าปิดด้านหน้า
2. แผงสวิตช์
3. ลำโพง
4. ผิวหนัง
5. วัสดุรองช่องคลอด
6. เครื่องกำเนิดเสียงหัวใจเด็ก
7. เด็กทารก(ขนาด 10 เดือน)
8. เยื่อถุงน้ำคร่ำ
9. กระดูกเชิงกราน (แสดง LUMBAR VERTEBRAE)
10. ลูกยาง
11. ท่อลม

2. ข้อควรระวังที่สำคัญ

1. ใช้หม้อแปลงทุกครั้งที่เปิดใช้
2. ปฏิบัติต่อหุ่นเหมือนคนใช้จริงเพราะหุ่นทำจากยาง ซิลิโคนซึ่งมีลักษณะคล้ายผิวคน
3. ถุงน้ำข้ามทำจากวัสดุที่แข็งแรงแต่ไม่ควรบีบจนเกินไปเพราะอาจทำให้ฉีกขาดได้
4. ไม่ควรทำให้หุ่นเปียกชุ่ม
5. ใช้แปรงฟันทำความสะอาดผิวหนัง เพื่อความอ่อนนุ่ม
6. การทำความสะอาดใช้น้ำสบู่อ่อนเช็ดบริเวณที่เพื่อนด้วยผ้านุ่มสำหรับความสกปรกที่ติดแน่นให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งชุบสารอีธานอล

หมายเหตุ ไม่ควรใช้สาร THINNER ,เบนซิน,กับฟุน

3. วิธีการใช้ที่ถูกต้อง

1. ผิวหนังสามารถใส่หรือถอดออกจากฟุนทั้งสองข้าง/ขวาและซ้าย/และยึดติดด้วยเทป
 - ☐ ใส่ผิวหนังบนฟุนอย่างระมัดระวังเพื่อให้ผิวหนังครอบพอดีกับลำตัวฟุน
2. ลักษณะและตำแหน่งของทารกเปลี่ยนได้ตามความต้องการ
 - ☐ ในลักษณะท่าก้นพอสมควรวางพาดผ่านด้านล่างเพื่อไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งาน
3. ลักษณะเกลียวที่ลูกยางเพื่อปีบลมเข้าไปในถุงน้ำคร่ำ
 - ☐ ถ้าปีบลมเข้าไปมากเกินไปทำให้ถุงน้ำคร่ำฉีกขาด
4. วัสดุรองช่องคลอดมี 2 ชั้น เล็กและใหญ่เมื่อวางในตำแหน่งที่พอเหมาะจะทำให้ฟุนอยู่ในลักษณะ

เหมาะสม

5. ลักษณะเต้านมตามแบบธรรมชาติสามารถแนะนำการดูแลก่อนคลอดแต่ไม่สามารถใช้ในการวัดเต้านม

นม

6. การใช้ไฟฟ้าได้ใช้หม้อแปลง/มาพร้อมฟุน/
 - ☐ ต่อเข้ากับที่เสียบชาร์ตไฟที่แผงสวิตช์
7. เมื่อสวิตช์เปิดจะได้ยินเสียงหัวใจทารกความดันและความถี่สามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มควบคุมขนาดเสียงและความถี่
 - ☐ ใช้หูฟังเพื่อฟังเสียงหัวใจเด็ก
8. เมื่อสวิตช์ลำโพงเปิดสามารถฟังเสียงหัวใจเด็กจากลำโพงได้
9. หลังการใช้ต้องปิดสวิตช์ทุกครั้ง

4. การทำความสะอาดและเก็บรักษาหลังการใช้งาน

1. ทำความสะอาดฟุนด้วยน้ำสบู่อ่อนสำหรับรอยเปื้อนที่ติดแน่นให้เช็ดด้วยผ้านิ่มชุบน้ำสะอาด ไม่ควรใช้สารทินเนอร์, เบนซิน

2. เมื่อผิวหนังหรือถุงน้ำคร่ำฉีกให้ทาด้วยแป้งเด็ก
3. อย่าทำให้ฟุนเปียกชุ่ม
4. ในการเก็บอย่าให้ท่อลมหักงอเพราะจะทำให้เสีย
5. ไม่ควรใส่สิ่งของเข้าไปในช่องท้องเพราะจะทำให้เสียรูปทรง
6. ไม่ควรวางฟุนในตำแหน่งถูกแดดโดยตรงหลีกเลี่ยงบริเวณที่ร้อนหรือชื้นเพราะทำให้คุณภาพด้อยลง
7. เก็บวางฟุนในลักษณะถูกต้องถ้าวางคว่ำหรือผิวด้านจะทำให้ฟุนเสียรูป