

หุ่นฝึกเย็บแผลฝีเย็บ



หุ่นฝึกเย็บแผลฝีเย็บ

EPISIOTOMY TRAINER (60225)

- ☐ หุ่นนี้ใช้สำหรับฝึกหัดการทำ EPISIOTOMY และแสดง THIRD DEGREE TEAR ของ PERINEUM
- ☐ แผ่นชั้นเนื้อนุ่ม ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อ
- ☐ การทำ EPISIOTOMY หรือการฉีกขาด กระทำได้ทั้งบริเวณซ้ายและขวาของรูเปิดช่องคลอด
- ☐ การเย็บสามารถฝึกเย็บได้ทั้ง MUSCULATURE SUTURING, SUBCUTANEOUS และ SUPERFICIAL SUTURING
- ☐ คันโยกซึ่งอยู่ด้านหลังหุ่น ออกแบบสำหรับดัน PERINEUM ไปข้างหน้า เพื่อให้รอยฉีกขาดเปิดออกให้เห็นกล้ามเนื้อชั้นลึก
- ☐ หุ่นนี้สำคัญต่อการฝึกหัดของพยาบาลและหมอ สามารถเย็บซ้ำได้หลายครั้ง

การถอดแผ่นเนื้อออกจากแท่นฝึก

ท่านจะได้รับชุดฝึกหัดนี้ พร้อมหมด ดังนี้

- a) การปลดหมุดสีดำ ใช้ไขควงคลายเกลียวแล้วถอดออก
- b) การปลดหมุนพลาสติกของ LIMBS & THINGS คลายเกลียวทวนเข็มนาฬิกา แล้วถอดออก

1. คลายเกลียวหมุดที่ยึดตัวครอบ (fig 1a & fig 1b)

2. ถอดหมุดออก (fig 2)
3. ถอดตัวครอบออกจากแท่น (fig 3)
4. คลายหมุดที่ยึดชั้นเนื้อไว้กับแท่นออก fig 4a เพื่อให้ชั้นเนื้อหลุดออกมาด้านหน้า fig 4b
5. คั่นโยกหลังแท่นติดกับแกนโลหะที่ยึดอยู่ภายใน ปลายแกนโลหะนี้จะงออยู่บริเวณช่องว่างลำไส้ใหญ่และช่องคลอดค่อยๆ ลอดแกนนี้ออกจากชั้นเนื้อ เพื่อให้ถอดแผ่นชั้นเนื้อ

การยึดแผ่นชั้นเนื้อกับแท่นฝึก

1. การยึดแผ่นชั้นเนื้อ วางชั้นเนื้อไว้บนมือข้างหนึ่ง โดยให้ด้านหน้าของชั้นเนื้ออยู่ด้านล่างส่วนมือหนึ่งค่อยๆ สอดแกนโลหะให้อยู่ระหว่างลำไส้ใหญ่และช่องคลอด
2. พยายามให้แกนโลหะอยู่ตรงกลาง และให้แน่ใจว่าแผ่นชั้นเนื้อที่อยู่ด้านหน้าแท่นอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง
3. ใช้หมุดยึดแผ่นชั้นเนื้อกับแท่นที่บริเวณของโดยรวบให้แน่น
4. ใช้ตัวครอบปิดชั้นเนื้อ และใส่หมุดยึด

การดูแลรักษา

1. เก็บให้ห่างจากแสงและความร้อน
2. ล้างมือก่อนสัมผัสกับชั้นเนื้อ (ถ้าผู้ฝึกสัมผัสกับโลหะ เช่น ทองแดง เมื่อมาถูกชั้นเนื้อ จะทำให้สีเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หรือกลายเป็นไม่มีสี)
3. ชั้นเนื้อนี้สามารถล้างน้ำสบู่ได้ เมื่อมีคราบสกปรก