

หุ่นจำลองการฝึกตัดเย็บ



หุ่นจำลองการตัดเย็บและการซ่อมฝีเย็บ

KEELE & STAFFS EPISOTOMY REPAIR

TRAINER (60450)

การถอด PERINEUM

- ฝีเย็บสามารถถอดออกจากฐาน เมื่อต้องการใส่ EPISIOTOMY INCISION PAD และ EPISIOTOMY & PERINEAL REPAIR PAD
 - สามารถทำความสะอาดในน้ำอุ่นและสบู่อย่างอ่อน
 - ทำให้ส่วนขอบแห้งสนิทก่อนจะใส่เข้าไปในฐานยึด การมาแบ่งฝู่นบาง ๆ จะช่วยดูดซึมความชื้นที่เหลือและทำให้การยึดง่ายขึ้น
1. ค่อย ๆ จับปุ่มตรงกลางยกขึ้นและจับแยกออกจากฐาน
 2. ยกมุมล่างออกแล้วค่อย ๆ ถอดขอบของ PERINEUM ออกจากขอบของฐาน เมื่อขอบถอดออกผ่าน

ส่วนกลางของฐาน ขึ้น PERINEUM ก็สามารถถอดออกทั้งหมด

การติดตั้ง EPISIOTOMY INCISION PAD

1. ตั้งฐานไว้บนโต๊ะ วางศีรษะเด็กโดยให้ปุ่มอยู่ในแนวร่องของฐาน
2. เลื่อนปุ่มลงไปในเรื่อง
3. วางแผ่น INCISION PAD บนฐาน โดยเริ่มติด VELCRO ส่วนล่างก่อน แล้วค่อยติดส่วนบน
4. หลังจากนั้น จึงติดส่วนที่เหลือ ดูให้แน่ใจว่าติดแน่นทั้ง 4 ด้าน
5. เมื่อมีการตัดฝีเย็บไปแล้ว สามารถกลับ 180 องศา เพื่อใช้อีกด้านหนึ่ง

การติดตั้ง EPISIOTOMY & PERINEAL REPAIR PAD

1. วางฐานบนโต๊ะ สอด PERINEAL REPAIR TECHNIQUES JIG ด้านที่มีปุ่มยึด ผ่านรูของฐาน
2. ติด JIG เข้ากับฐานด้วย VELCRO
3. สับส่วนปลายของ EPISIOTOMY & PERINEAL REPAIR แล้วสอดผ่านรูด้านหน้าของ JIG
4. ดันแผ่นผ่านท่อพลาสติกให้โผล่อีกด้านหนึ่ง
5. พับชิ้นส่วนลงมาด้านหน้าของ JIG ยึดติดด้วย VELCRO แล้วทำการตัด
6. ตรวจสอบว่ามีช่องพอไหม ถ้าไม่พอ ให้ติดแผ่นด้วย VELCRO ใหม่ เพื่อให้แผ่นยึดมากขึ้น

****สามารถใช้เฉพาะ JIG โดยปราศจากฐาน ส่วนของขาที่ยึดจะยึดติดได้เฉพาะผิวที่เรียบ****

การติด PERINEUM

1. วางส่วนขอบของ PERINEUM ที่ส่วนบนของฐาน แล้วค่อย ๆ พับส่วนขอบของ
2. PERINEUM ให้หุ้มส่วนขอบของฐานจนถึงมุมฐานให้แน่ใจว่าปุ่มของ PERINEUM ทุกปุ่มอยู่ในร่องของฐาน
3. สอดปุ่มตรงกลางของ PERINEUM เข้ากับร่องตรงกลางของฐาน

การสอดใส่ EPISIOTOMY & PERINEAL REPAIR BLOCK

1. สอดส่วนล่างของชิ้นเนื้อเพื่อเข้าไปในรูเปิดของฐานและดันเข้าไปโดยให้ตำแหน่งที่จะเย็บอยู่ข้างบน
2. ค่อย ๆ บีบส่วนบนของชิ้นเนื้อแล้วดันเข้าไป
3. กดด้านหลังเล็กน้อย เพื่อให้ชิ้นเนื้อเข้าไปจนสุด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิ้นเนื้ออยู่แนบติดกับขอบของ PERINEUM ถ้ามีช่องว่างให้ดันชิ้นเนื้อไปข้างหน้า
4. บีบส่วนบนของชิ้นเนื้อแล้วสอด CLIP พร้อมเลื่อนลงไปตามร่อง โดยใช้สองมือจับทั้งสองข้าง แล้วใช้หัวแม่มือกด CLIP ให้เลื่อนลงจนอยู่ใต้สันพลาสติก
5. ถ้าส่วนบนชิ้นเนื้อติดอยู่ระหว่างฐานและ CLIP ให้ดันชิ้นเนื้อไปข้างหน้าและไปด้านล่าง หุ่นก็พร้อมจะใช้งาน

****ถ้าการเย็บอย่างระมัดระวัง ก็สามารถตัดใหม่และเย็บใหม่ได้ ชิ้นเนื้อแต่ละชิ้น สามารถฝึกปฏิบัติได้ 3 ตำแหน่ง (ตำแหน่ง LEFT CATERAL ได้ติดมาแล้ว แต่ RIGHT CATETAL ยังไม่ได้ติด)****

การยึดฐาน

1. วางแท่นหุ่นไว้ที่ขอบโต๊ะ และยึดด้วยตัว CLAMP ที่ด้านหน้าทั้งสองข้าง
2. ในการเปิด CLAMP ให้บีบแกนอันเล็ก
3. ในการปิด CLAMP ให้บีบแกนอันใหญ่