

ชุดฝึกปฏิบัติการดูแลเด็กที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ



หุ่นจำลองทางเดินหายใจถูกอุดกั้นได้รับการออกแบบเพื่อให้ นักศึกษาในชั้นปฐมนิเทศศึกษาในชั้นปฐมนิเทศพยาบาล มีโอกาสฝึกปฏิบัติการขจัดเอาสิ่งอุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ หุ่นแต่ละตัวผลิตโดยใช้โพลีเอทิลีนที่แข็งแรงทนทาน หุ่นมีกระดูกซี่โครง Sternum และกระดูกอ่อน Xiphoid process ซึ่งเป็นตำแหน่งทางกายวิภาคสำหรับการฝึกปฏิบัติเมื่อทางเดินหายใจถูกอุดกั้น และการทำ Abdominal thrusts และ chest thrusts จะทำให้สิ่งอุดกั้นถูกขับออกมา

การเตรียมหุ่นจำลอง

เลือกสิ่งที่จะทำให้ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นและใส่เข้าไปในคอหุ่น ลูกบอลกลมๆจะถูกขับออกไม่ยากนัก ขึ้นเนื้อจำลองเพิ่มปริมาณของการอุดกั้นและจำเป็นจะต้องดันหลายเพื่อที่จะทำทางเดินหายใจโล่ง ให้ใช้แบบเลือกครั้งละอันเพื่อว่าสายเสียงจะได้ไม่พันกัน

หมายเหตุ สำหรับชุดของหุ่นจำลองทางการศึกษาสำหรับฝึกปฏิบัติเมื่อทางเดินหายใจถูกอุดกั้นจะมีเพียงลูกบอลกลมๆเท่านั้น

การดูแลบำรุงรักษาหุ่นจำลอง

เนื่องจากหุ่นจำลองสำหรับการฝึกการช่วยเหลือเมื่อทางเดินหายใจถูกอุดกั้น จึงจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดพื้นผิวภายนอก ศีรษะและลำตัวหุ่นสามารถล้างด้วยน้ำสบู่อุ่นๆล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งสนิท

ข้อควรระวัง

ระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในส่วนภายในของหุ่นซึ่งมีโพรงบรรจุอยู่เป็นส่วนใหญ่