


หุ่นจำลองประเมินความก้าวหน้าในการคลอด

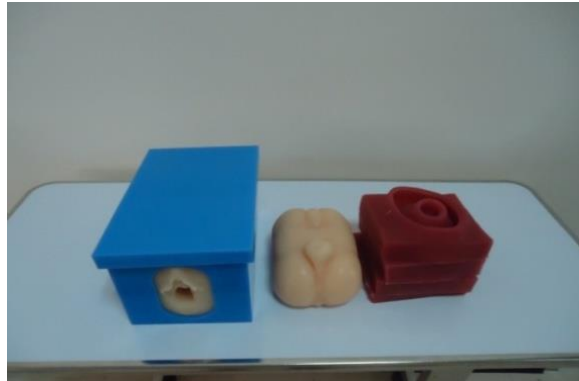

หุ่นสามารถใช้ในการสอนขั้นตอนที่สามารถสาธิตได้ดังนี้

1. สามารถเรียงแบบจำลองปากมดลูก(cervical models) เพื่อให้ผู้เรียนฝึกสังเกตและสัมผัสถึงความแตกต่าง สามารถกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการตั้งครรภ์ครั้งแรก (primigravidas) และการตั้งครรภ์หลายครั้ง (multigravidas) และสอนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างปากมดลูกในตำแหน่ง interior และ midline ภายหลังการตั้งครรภ์
2. สามารถวางศีรษะทารกไว้ด้านหลังของปากมดลูกในภาวะใกล้คลอด เพื่อฝึกประเมินตำแหน่งศีรษะของทารกและฝึกการหมุนศีรษะทารก สามารถฝึกศีรษะทารกเพื่อระบุตำแหน่งของใบหน้าและบริเวณคิ้ว สามารถปรับตำแหน่งของปากมดลูกเพื่อหาขอบด้านหน้าของปากมดลูก(anterior cervical lip)
3. สามารถวางส่วนอวัยวะเพศหญิง หรือชายไว้ที่ด้านหลังของแบบจำลองปากมดลูกเพื่อสาธิตการคลอดที่มีก้นเป็นส่วนนำ (breech presentation)
4. สามารถสาธิตการสอด intrauterine presser catheter ระหว่างศีรษะของทารกและปากมดลูก และการติด spiral electrode ที่บริเวณหนังศีรษะทารก

หุ่นสามารถใช้ในการสอนขั้นตอนที่ไม่สามารถสาธิตได้ดังนี้

1. เลือกระยะของปากมดลูกในระยะที่ต้องการทดสอบ จากนั้นวางเรียงแบบจำลองดังกล่าวไว้ในกล่องพลาสติกสีฟ้า โดยไม่ให้ผู้เรียนทราบ โดยมีวัสดุ BIOLIKE สีเหลืองชมพู 2 ชิ้นสำหรับวางในตำแหน่งใดก็ได้ เพื่อประคองศีรษะของทารกให้คงที่ ภายในกล่องและเพิ่มความหลากหลาย ผู้สอนสามารถเลือกเพิ่มของ

พลาสติกบรรจุเจล (amniotic membranes) ในตำแหน่งใดก็ได้ ผู้สอนสามารถทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ในเรื่องที่ผู้สอนได้สาธิตไปแล้ว โดยใช้แบบจำลองที่สามารถมองเห็นได้

2. สามารถฝึกให้ผู้เรียนสวมถุงมือและใส่เจลหล่อลื่นทาลงบนถุงมือ คล้ายกับการตรวจทางช่องคลอดกับผู้ป่วยจริง และสามารถสอนการวางตำแหน่งมือที่ถูกต้องสำหรับการตรวจทางช่องคลอดได้
3. สามารถใช้สอนผู้เรียนเป็นรายบุคคลเมื่อผู้เรียนได้ประเมินการขยายตัวของปากมดลูกแล้ว ผู้สอนสามารถเปิดฝากล่องพลาสติก ให้ผู้เรียนเห็นสภาพที่แท้จริงได้ และผู้สอนสามารถอธิบายเพิ่มเติมหากผู้เรียนตอบไม่ถูกต้อง
4. สามารถใช้ผสมผสานแบบจำลองแต่ละชิ้น พิสูจน์การสอด และการหมุน ของ IUPC หรือ spiral electrodes ที่ถูกต้อง

วิธีการดูแลรักษา

หุ่นผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ BIOLIKE 2™ ผู้ใช้หุ่นด้วยความระมัดระวัง โดยโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ เพื่อยืดอายุการใช้งานของหุ่น ให้ยาวนาน สามารถโรยแป้งฝุ่นลงบนผิวหน้าหุ่นเพื่อเพิ่มความเนียนนุ่ม สามารถทำความสะอาดหุ่นได้โดยการเช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดหมาด ห้ามเช็ดหัวลงในน้ำหาชนสกปรกมาก สามารถเช็ดคราบสกปรกด้วยแอลกอฮอล์และโพลดแป้งฝุ่นบ้าง ห้ามทิ้งให้หุ่นสัมผัสกับหมึกหรือสิ่งพิมพ์ใดๆ เนื่องจากจะทำให้เกิดรอยเปื้อนที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้ โปรดจรงรักษาหุ่นไว้ในกระเป๋าทูกรั้งเมื่อไม่ใช้งาน ห้ามทิ้งให้หุ่นสัมผัสกับความร้อน หรือหรือแสงแดดโดยตรง

หมายเหตุ หุ่นใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ห้ามรับประทาน